

Tableau de bord pour les premiers soins

Tout de suite après la naissance du veau

- Le veau respire-t-il ? Éliminer les glaires de la bouche et de la gorge et pratiquer la réanimation au besoin (sauveteur de veaux).
- Vérifier l'état de santé de la mère (fièvre de lait par exemple).
- Encourager la vache à lécher le veau pour le sécher.



Préparation de l'allaitement au colostrum

- Prendre du colostrum congelé dans le réfrigérateur ou congélateur.
- Réchauffer la mallette à colostrum à la température de buvée dans le bain-marie.



Premiers soins au veau

- Séparer le veau d'avec la vache.
- Amener le veau dans un box désinfecté avec une litière copieuse.
- Désinfecter son nombril et lui administrer oralement une solution de fer.



Premier repas au colostrum

- Sortir la mallette à colostrum du bain-marie au bout de 15 minutes.
- Raccorder le tuyau avec la tétine sur le sachet.
- Mettre la mallette à une hauteur un peu au-dessus de la tête du veau (se servir de la sangle).
- Donner au veau 4 litres de colostrum ; se servir d'une sonde orale au besoin, si le veau refuse de boire le liquide sans encouragement ; s'y faire initier par un vétérinaire !



Traite du colostrum

- Nettoyer soigneusement la mamelle et tirer les premiers jets de chaque quartier.
- Traire la vache.




Vérification de la qualité du colostrum

- Déterminer quelle est la qualité à l'aide d'un colostromètre ; l'indicateur au vert veut dire que la qualité est bonne.
- Remplir au colostrum les sachets préalablement disposés dans la mallette et en préparer deux ou trois au besoin.
- Jeter le colostrum présentant une décoloration ou de mauvaise qualité (indicateur au rouge).



Pasteurisation du colostrum (en option)

- Mettre une ou deux mallettes de colostrum de bonne qualité dans le coloQuick Pasteur.
- Démarrer la pasteurisation.
- Au bout de 1,5 heure (dont 60 minutes de pasteurisation), sortir les mallettes.

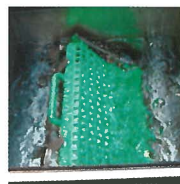

Congélation du colostrum

- Constituer une réserve de colostrum congelé (pour en avoir en stock lors des vêlages où le colostrum de la mère n'est pas de bonne qualité, ce qui est souvent le cas chez les génisses, et des cas semblables).



Produit fourni avec :

- Dispositif de remplissage
- Bain-marie
- Colostromètre
- 10 mallettes
- 20 sachets
- Tétine et sonde orale pour le drenchage

HOLM & LAUE



COLOQUICK
Handling colostrum *—fast and gentle*

sain, hygiénique, cohérent

Colostrum – l’or liquide !

Pour tous les éleveurs de bovins, le développement optimal des veaux est la base de la réussite. De nos jours, l’on ne peut plus se permettre de ne pas mettre pleinement à profit tout le potentiel génétique de son troupeau. Chaque éleveur sait que l’absorption de colostrum est importante pour le nouveau-né. Cependant, ce qui a été démontré par des études très récentes, pose des problèmes à peine maîtrisables aux routines de travail traditionnelles : 4 litres de colostrum d’une qualité impeccable devrait être bu par le veau dans la première heure après le vêlage, afin de laver tout le tractus digestif. Cela renforce ses défenses naturelles et se solde par une production laitière sensiblement plus élevée.

Et pourtant, toutes les vaches ayant mis bas n’ont pas de colostrum impeccable, et très peu de veaux absorbent 4 litres en 1 heure à téter la mamelle ! Y a-t-il donc un mode pratique pour vérifier rapidement la qualité du colostrum, de disposer à tout moment d’une réserve de haute qualité et d’en administrer 4 litres au veau de façon rapide et facile ?

Le système coloQuick vous permet de constituer de façon continue un stock de colostrum de première qualité, de sorte que vous êtes toujours en mesure d’offrir aux veaux un départ idéal. En même temps, sa conception unique assure qu’il s’insère pratiquement et facilement dans le quotidien de votre exploitation.



- Cohérence au lieu de hasard*
- Santé maximale dès le tout début*
- Meilleurs résultats à prix intéressant*

Voilà ce qui est au cœur du système de gestion coloQuick.

Pour en savoir plus, consulter notre Manuel Veaux. N’hésitez pas à nous le demander gratuitement.



Imprimé de télécopie

+49 4331 20 174 29

Expéditeur

Je m’intéresse à :

D.A.L. H&L 100

Taxi-Lait

Taxi-Lait pasteurisateur

coloQuick

Igloo H&L

Système d’igloos

Véranda d’igloo

Cornadis spécial pour veaux

Véranda MultiMax

Jardin des Veaux

Igloos individuels

Pen System de Calf-Tel

Stabulation pour veaux de Holstein

Sauveteur de veau CalfVital

Manteau pour veaux

Service relatif aux technologies d’allaitement

Au sujet des produits cochés, je souhaite :

recevoir des informations plus détaillées

recevoir un devis

prendre conseil

Date souhaitée d’un rendez-vous :

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Allemagne

Téléphone : +49 4331 20 174 0

Télécopie : +49 4331 20 174 29

Courriel : info@holm-laue.de

Internet : www.holm-laue.de